



1. Pak enheden ud

Sørg for, at alle komponenter er inkluderet:

Brugervejledning
Ekstra ærme
BalanceBelt
Strømadapter
USB-C-kabel

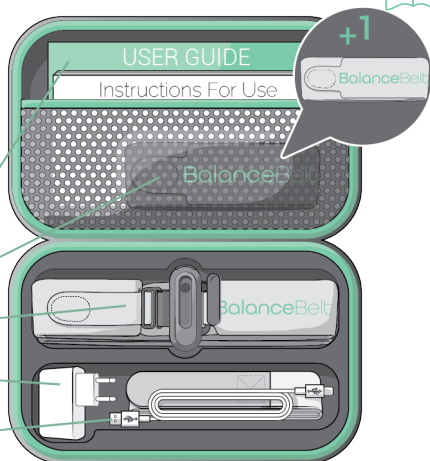

2. Opladning af batteriet

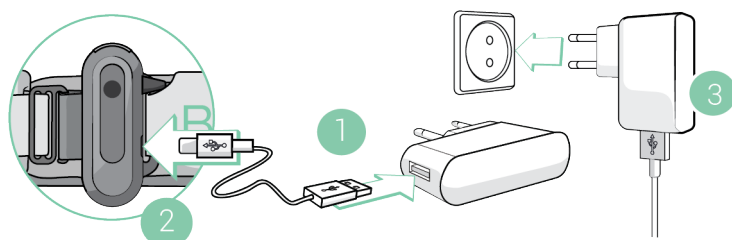


Tilslut USB-C-kablet til BalanceBelt og den medfølgende strømadapter. Sæt den i en stikkontakt, og oplad i mindst 6 timer før første brug. Batteriet giver op til 16 timers kontinuerlig brug. Det anbefales at oplade bæltet regelmæssigt (overnat).

⚠ **Bær aldrig BalanceBelt under opladning(!)**


3. At bære BalanceBelt

Spænd BalanceBelt fast omkring din talje over en tætsiddende undertrøje, og sørg for, at logoet vender udad, og knappen er øverst. En løs pasform kan reducere vibrationseffektiviteten, så justér remmen og Velcroen for en sikker pasform. Centrér spændet foran.

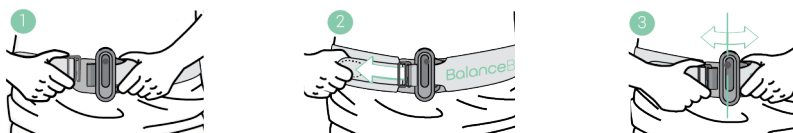

4. Tænd for enheden

Tryk **og hold** tænd/sluk-knappen nede i 3+ sekunder, indtil LED'en blinker blå, og vibrationsmotorerne aktiveres i et cirkulært mønster.

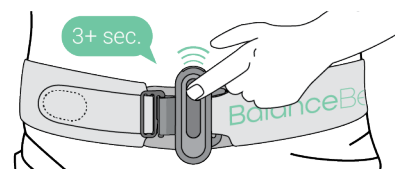

5. Brug af BalanceBelt

BalanceBelt registrerer din ubalance og sender signaler til din hjerne for at udløse en korrigerende bevægelse. Dette sker ubevidst, så du bør ikke fokusere på vibrationerne, for at bæltet fungerer optimalt.

Gå med BalanceBelt

Når du går, vil bæltet give kontinuerlig feedback – dette er normalt. Når du står stille, vil bæltet kun give feedback, hvis du er ude af balance.

Automatisk stop

Når du er i en stabil position, f.eks. når du sidder eller står stille, stopper bæltet automatisk med at vibrere.


Rejs sig op

Når du rejser dig fra en siddende position, vent med at begynde at gå, indtil bæltet er holdt op med at vibrere. BalanceBelt skal kalibrere, før det kan give korrekt feedback.

Indstilling af vibrationsintensitet

Tryk på knappen tre gange for at skifte til høj intensitet (lilla lys) og endnu tre gange for at vende tilbage til standard intensitet (grønt lys). Tryk på knappen fem gange for at skifte til lav intensitet (gult lys) og endnu fem gange for at vende tilbage til standard.

Rådfør dig med din læge for at finde den bedste indstilling for dig. Bæltet starter altid i 'Standard' intensitet, når det tændes.

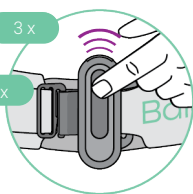

Rejser med BalanceBelt


Nogle foretrækker at bære bæltet under rejser i bil, bus, tog eller fly, mens andre ikke gør. Du kan nemt tænde eller slukke for bæltet efter behov. Husk blot at tænde det igen, når du rejser dig fra din plads.

Gå udenfor

Det anbefales at indstille BalanceBelt til øget intensitet, når du går udenfor eller cykler.


Lavt batteriniveau-indikator

Tryk på knappen for at vise batteriniveauet: 4x grønt = fuldt, 3x = $\frac{3}{4}$, 2x = halvt, 1x = $\frac{1}{4}$. Ved 10 % lyser det gult, ved 5 % rødt, hvorefter bæltet slukker. En advarselsvibration signalerer overgangen til gul, rød og nedlukning.

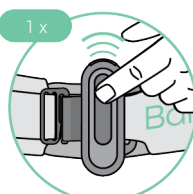

6. Slukning

Tryk **og hold** tænd/sluk-knappen nede i 3+ sekunder for at slukke bæltet. LED'en blinker blå, og tre svage vibrationer bekræfter nedlukningen.

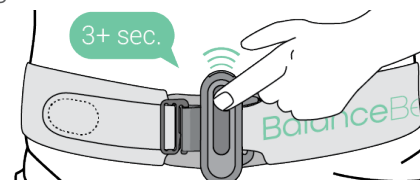

Enhedsidentifikation & Producentinformation Enhedsnavn: BalanceBelt version 1.5 Producent: Elitac BalanceBelt BV, Adresse: Nijverheidsweg 16B, 3534 AM Utrecht, The Netherlands Hjemmeside: www.balancebelt.net Supportkontakt: info@balancebelt.net	Tiltænkt anvendelse ☑ BalanceBelt er beregnet til personer med nedsat balance på grund af alvorligt vestibulært tab. ☑ Den er velegnet til alle aldersgrupper, inklusive børn, når de begynder at bevæge sig selvstændigt, afhængigt af en lægelig vurdering. ☑ Tilpasning og den første balancevurdering bør foregå i et kontrolleret klinisk miljø under opsyn af en sundhedsprofessionel eller læge. ☑ BalanceBelt er klassificeret som en medicinsk enhed i klasse 1 og har til formål at forbedre livskvaliteten for personer med BVL og lignende tilstande.
Kontraindikationer ☑ Ikke egnet til personer med ikke-vestibulære balanceforstyrrelser (f.eks. af neurologisk oprindelse). ☑ Må ikke bruges sammen med andre hjælpemidler, der kan påvirkes af vibrationer.	Batteri & Opladning ☑ Genopladeligt Li-ion-batteri med 16 timers driftstid. Oplad kun med den medfølgende USB-C-adapter. ☑ Batteristatus vises via LED ved at trykke på knappen (kun når enheden er tændt).
Opbevaring & Håndtering Drifts- & opladningstemperatur: 10°C - 40°C. Opbevaringstemperatur: -20°C to 45°C. ⚠ Må ikke udsættes for ekstreme forhold.	Advarsler & Forholdsregler ⚠ Læs brugsanvisningen før brug. ⚠ Skal bæres omkring taljen. ⚠ Hold mindst 15 cm afstand til pacemakere og ICD'er. ⚠ Forebygger ikke fald. ⚠ Må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for kraftig regn. ⚠ Må ikke modificeres, adskilles eller få udskiftet komponenter. ⚠ Brug kun officielle tilbehør. ⚠ Ikke beregnet til brug i industrielle miljøer. ⚠ Kontroller enheden for skader før hver brug.
Fejlfinding Blåt lys konstant eller langsomt blinkende > Systemfejl registreret. Løsning: Genstart. Hvis problemet fortsætter, kontakt leverandøren. BalanceBelt vibrerer ikke eller vibrerer konstant > Kalibreringsproblem eller systemfejl. Løsning: Genstart. Hvis problemet fortsætter, kontakt leverandøren. BalanceBelt genstarter under brug > Systemet har registreret et uløseligt problem. Løsning: Genstart. Hvis problemet fortsætter, kontakt leverandøren. Opstartens cirkulære vibrations-mønster er ujævnt eller ufuldstændigt > En af vibrationsmotorerne kan være defekt. Løsning: Kontakt leverandøren.	Rengøring & Vedligeholdelse Kun det aftagelige stofærme er vaskbart – se vaskeanvisningerne på ærmet. For vejledning om udskiftning, se de fulde brugsanvisninger. ⚠ Må ikke vaskes – rengør spændet og knappen med en tør klud.
Disposal ⚠ Bortskaffes i henhold til WEEE-reglerne. ⚠ Må ikke smides ud med husholdningsaffald. 	Overholdelse af regler og standarder CE-mærket. Overholder MDR 2017/745 og relevante EU-direktiver: 2001/95/EC - 2014/30/EU - 2011/65/EU - 2012/19/EU – 94/62/EC – 2006/66/EC – regulation (EC) No 1907/2006 
	Fuld brugsanvisning (IFU) Scan QR-koden eller besøg www.balancebelt.net/en/IFU for at downloade den nyeste brugsanvisning (IFU). Har du brug for en trykt kopi? Kontakt info@balancebelt.net  